

NOVOBIOCIN ANTIMICROBIC SUPPLEMENT

IMPIEGO PREVISTO

Supplemento selettivo liofilo per l'isolamento dei ceppi mobili di *Salmonella*.

CONTENUTO DELLE FIALE

Novobiocina 10 mg

PREPARAZIONE

Preparare 500 ml di Rappaport Vassiliadis Semi-Solid Medium Modified (MSRV) autoclavato e raffreddato a 45-50°C. Ricostituire il contenuto della fiala di Novobiocin Antimicrobial Supplement, con 5 ml di acqua distillata sterile ed addizionala al terreno in precedenza raffreddato. Mescolare bene e distribuire in piastre Petri sterili. Lasciare asciugare le piastre all'aria per 1 ora.

METODO D'IMPIEGO

Addizionato al terreno MRSV il supplemento consente l'isolamento dei ceppi mobili di *Salmonella*. Per una completa descrizione del metodo d'impiego del terreno completo si rimanda alla scheda tecnica di Rappaport Vassiliadis Semi-Solid Medium Modified (MSRV).

CONSERVAZIONE E VALIDITA'

Conservare a 2-8°C. In queste condizioni il prodotto è valido fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Non utilizzare oltre questa data. Eliminare se vi sono segni di deterioramento. Validità dalla data di produzione: 16 mesi.

PRECAUZIONI E SICUREZZA DEGLI OPERATORI

Il preparato qui descritto contiene novobiocina ed è classificato come Xi (irritante) ai sensi della legislazione vigente. Consultare la scheda di sicurezza prima dell'impiego.

Il prodotto qui descritto è un diagnostico *in vitro* per uso professionale e deve essere usato in laboratorio, da operatori adeguatamente addestrati, con metodi approvati di asepsi e di sicurezza nei confronti degli agenti patogeni. Sterilizzare i materiali inoculati dopo il loro uso e prima dell'eliminazione come rifiuto.

CONFEZIONI

**4240045 Novobiocin Antimicrobial Supplement,,
10 fiale liofile, ciascuna per 500 ml di terreno.**

